


TESTVERFAHREN ZUR SCHWANGERSCHAFTSDIAGNOSE zur Eigenanwendung

PRINZIP

Der maybe-baby Schwangerschaftstest ist eine Testvorrichtung für den qualitativen Nachweis des hCG-Hormons (humanes Choriongonadotropin) im Urin. Diese Testvorrichtung wird zur Erkennung einer Schwangerschaft benutzt. Sie kann ab dem Zeitpunkt der erwarteten Monatsregel verwendet werden. Bei dem Test wird speziell eine erhöhte Menge an hCG-Hormon mit Hilfe einer Antikörperkombination festgestellt. Zur Testdurchführung wird die absorbierende Stäbchenspitze direkt in den Urinstrahl gehalten oder in den Urin getaucht. Dadurch wird ein Ergebnis in Form von farbigen Linien bewirkt.

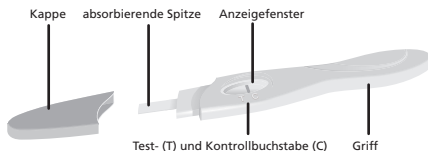

VORSICHTSMASSNAHMEN

Vor Testdurchführung ist die Gebrauchsanleitung aufmerksam zu lesen. Nicht mehr benutzen, wenn das auf dem Aluminiumbeutel angegebene Haltbarkeitsdatum überschritten ist.

Trocken bei 4 – 30 °C (oder 40 – 86 °F) aufbewahren.

Vor dem Öffnen muss der Aluminiumbeutel Umgebungstemperatur haben.

Nicht einfrieren.

Geöffneten oder beschädigten Beutel nicht benutzen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nur zur in-Vitro-Diagnose. Nicht verschlucken.

Aluminiumbeutel erst unmittelbar vor der Testdurchführung öffnen.


SCHACHTELINHALT

Ein Aluminiumbeutel, in dem sich 1 Testvorrichtung, 1 Trockenbeutelchen und eine Gebrauchsanleitung befinden.

GBRAUCHSANLEITUNG

1. Testvorrichtung aus dem Aluminiumbeutel nehmen.
2. Abdeckkappe von der absorbierenden Stäbchenspitze abnehmen.

3. Testvorrichtung am Griff anfassen und die absorbierende Stäbchenspitze mindestens 10 Sekunden lang in den Urinstrahl halten, bis die Spitze ganz durchfeuchtet ist. Siehe Abbildung unten.
4. ACHTUNG: Nicht auf das Anzeigefenster (C+T) urinieren. Sie können den Urin auch in einem sauberen Behälter auffangen und dann die absorbierende Stäbchenspitze mindestens 10 Sekunden lang eintauchen.
5. Verschlusskappe wieder auf die Spitze setzen und die Testvorrichtung auf eine trockene, gerade und waagerechte Oberfläche legen, wobei das Anzeigefenster nach oben zeigen muss.
6. Zu Beginn des Prüfvorgangs tritt möglicherweise eine rote Verfärbung auf, die sich im Anzeigefenster bei beiden Buchstaben (C + T) zeigt. Das Ergebnis nach 3 Minuten ablesen. Wenn keine farbige Linie erscheint, noch eine Minute abwarten. Einige positive Ergebnisse können je nach hCG-Konzentration bereits nach 1 Minute oder schneller erscheinen.

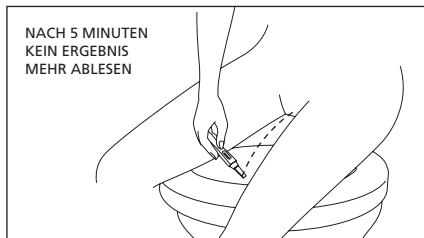

DEN TEST ABLESEN



POSITIV: Es erscheinen zwei deutliche, farbige Linien. Eine Linie befindet sich beim Kontrollbuchstabe (C) und eine zweite Linie beim Testbuchstabe (T). Möglicherweise ist eine der beiden Linien deutlicher, weil die zwei Linien nicht unbedingt gleich intensiv zu sehen sind. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich schwanger sind.



NEGATIV: Beim Kontrollbuchstabe (C) erscheint eine farbige Linie. Beim Testbuchstabe (T) ist keine Linie zu sehen. Das bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind.



BEDEUTUNGSLOS: Wenn keine Linie beim Kontrollbuchstabe (C) erscheint, ist das Ergebnis ungültig, auch wenn beim Testbuchstabe (T) eine Linie zu sehen ist. Machen Sie einen erneuten Test.

TESTGRENZEN

Dieser Test kann eventuell falsche Positiv- oder Negativergebnisse ergeben. Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie eine medizinische Entscheidung treffen. Die Einnahme von Medikamenten, die hCG enthalten (wie z.B. Pregnyl, Profasi, Pergonal und APL) kann falsche Positivergebnisse bewirken. Durch die Einnahme von Alkohol, Medikamenten, wie z.B. Penicillin, Antibiotika, orale Anti-Baby-Pillen oder Hormontherapien, in denen kein hCG enthalten ist, dürfte das Testergebnis nicht beeinträchtigt werden. Neben der Schwangerschaft können eine Reihe von Pathologien, z.B. eine Eierstockzyste oder eine ektopische Schwangerschaft (Eileiter-Schwangerschaft) eine erhöhte hCG-Menge und damit ein falsches, positives Ergebnis verursachen.

FRAGEN UND ANTWORTEN

- F.: Wie funktioniert der Test?**
A.: Bei dem Schwangerschaftstest maybe-baby wird in Ihrem Urin ein Hormon (hCG – humanes Choriongonadotropin) nachgewiesen, das während der Schwangerschaft von Ihrem Körper produziert wird. Im Laufe der Schwangerschaft vermehrt sich die Menge des hCG-Hormons.
- F.: Wie schnell muss ich den Test machen, wenn ich eine Schwangerschaft vermutet?**
A.: Sie können Ihren Urin ab dem Datum der errechneten Monatsregel testen. Sie können den Test zu jeder Tageszeit machen. Allerdings enthält im Fall einer Schwangerschaft der erste morgendliche Urin am meisten hCG-Hormon.
- F.: Muss ich den Test unbedingt mit dem ersten morgendlichen Urin durchführen?**
A.: Sie können den Test jederzeit während des Tages machen, aber Ihr erster Urin am Morgen ist im Allgemeinen am stärksten konzentriert und enthält am meisten hCG.
- F.: Wie zuverlässig und genau ist der Test?**
A.: Labortests haben erwiesen, dass der maybe-baby Schwangerschaftstest zu über 99% zuverlässig und genau ist.
- F.: Welche Sensitivität hat der Test?**
A.: Der Schwangerschaftstest maybe-baby weist das hCG-Hormon ab 25 IU/l nach und kann ab der fälligen Periode durchgeführt werden.

Der Test spürt das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin) im Urin auf. Dieses Hormon ist ab der 1. Woche der Befruchtung nachweisbar und seine Konzentration verdoppelt sich alle 1,5 bis 2 Tage. Am ersten Fälligkeitstag der Periode (2 Wochen nach der Befruchtung) ist der hCG-Spiegel auf über 100 IU/l angestiegen. Der Höchstwert tritt in der 10. – 12. Woche auf und liegt dann zwischen 30.000 und 200.000 IU/l.

- F.: Was muss ich tun, wenn das Ergebnis anzeigt, dass ich schwanger bin?**
A.: Das bedeutet, dass Ihr Urin hCG enthält und Sie wahrscheinlich schwanger sind. Konsultieren Sie zur Bestätigung der Schwangerschaft Ihren Arzt und besprechen Sie mit ihm die weitere Behandlung.
- F.: Woher weiss ich, dass der Test richtig funktioniert hat?**
A.: Wenn eine farbige Linie beim Kontrollbuchstabe (C) erscheint, wissen Sie, dass Sie den Test korrekt durchgeführt haben und die richtige Urinmenge absorbiert wurde.
- F.: Was muss ich tun, wenn das Ergebnis anzeigt, dass ich nicht schwanger bin?**
A.: Das bedeutet, dass kein hCG-Hormon in Ihrem Urin festgestellt wurde und Sie wahrscheinlich nicht schwanger sind. Wenn Ihre Monatsregel eine Woche nach dem voraussichtlichen Datum nicht eingetreten ist, führen Sie einen erneuten Test durch. Wenn Sie nach dem erneuten Test dasselbe Ergebnis erhalten und Ihre Monatsregel noch nicht eingetreten ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Wir möchten Sie dazu anregen, folgende Schritte zu unternehmen, damit Sie Ihre Chancen auf eine angenehme Schwangerschaft und ein gesundes Baby erhöhen. Wenn das Resultat positiv ist, können Sie die pränatale Betreuung veranlassen und sich am besten sofort mit ihrem Arzt in Verbindung setzen. Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung, hören Sie auf zu rauchen und reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum auf ein Minimum.

Folsäure: Folsäure ist unentbehrlich für die normale embryonale Entwicklung des Kindes. Besonders während der Schwangerschaft ist Folsäure von hoher Bedeutung, da sie zu einem gesunden Zellteilungs- und Zellbildungsprozess beiträgt und sich positiv auf die Entwicklung des Nervensystems auswirken kann.

SYMBOLVERZEICHNIS

 Achtung: Gebrauchsanleitung beachten.	 Anzahl Tests pro Packung	 Hersteller
 Nur zum In-Vitro-Gebrauch	 Verbrauchen bis:	 Nicht wiederverwenden
 Aufbewahrung bei 4 - 30°C	 Losnr.	



LaVita GmbH
Alt Praunheim 46D
D-60488 Frankfurt/Main
Germany

CE 0537

ARTIKEL : 3532679226452
Version 1 : 05/2012

