


TEST DE DIAGNOSTIC DE GROSSESE

destiné à des autodiagnostic

PRINCIPE

Le test de grossesse maybe-baby est un test de détection qualitative de l'hormone gonadotrophine chorionique humaine (hCG) dans l'urine utilisé pour la détection de la grossesse. Il peut être utilisé dès la date présumée des règles. Le test utilise une combinaison d'anticorps permettant de détecter spécifiquement des taux élevés de l'hormone hCG. Le test est réalisé en urinant directement sur la mèche absorbante ou en immergeant celle-ci dans l'urine, ce qui permet d'obtenir un résultat sous forme de lignes colorées.

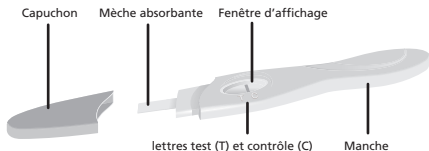

PRECAUTIONS

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le test.
Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur le sachet aluminium.
Conserver dans un endroit sec entre 4° – 30° C (ou 40° – 86° F).
Le sachet d'aluminium doit être à température ambiante avant son ouverture.
Ne pas congeler.
Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé.
Ne pas laisser à la portée des enfants.
Pour diagnostic in vitro uniquement. Ne pas ingérer.
Ouvrir le sachet aluminium juste avant la réalisation du test.

COMPOSITION DE LA BOITE


Un sachet aluminium contenant 1 test et 1 sachet dessiccant, 1 mode d'emploi.

MODE D'EMPLOI :

1. Sortir le test de son sachet en aluminium.
2. Retirer le capuchon qui recouvre la mèche absorbante.

3. Tenir le test par le manche et placer la mèche sous un jet d'urine pendant au moins 10 secondes jusqu'à ce qu'elle soit complètement humide. Voir illustration ci-dessous.
4. NOTE : Ne pas uriner sur la fenêtre d'affichage (C+T). Il est également possible de recueillir les urines dans un récipient propre et sec puis d'immerger la mèche dans l'urine pendant au moins 10 secondes.
5. Replacer le capuchon sur la mèche et poser le test sur une surface sèche, horizontale et plane avec la fenêtre d'affichage devant être dirigée vers le haut.
6. Au début de la procédure de contrôle, il est possible qu'une coloration rouge apparaisse dans la fenêtre d'affichage au niveau des deux lettres (C + T). Lire le résultat après 3 minutes. En l'absence d'une ligne colorée, attendre encore une minute. Certains résultats positifs peuvent apparaître en 1 minute ou moins en fonction de la concentration en hCG.

NE PAS LIRE LE
RESULTAT APRES
5 MINUTES.

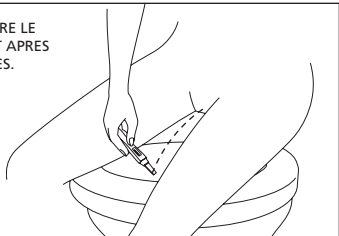

LECTURE DU TEST



POSITIF: Deux lignes colorées apparaissent clairement. L'une de ces lignes se trouve au niveau de la lettre contrôle (C) et la deuxième ligne au niveau de la lettre test (T). Il est possible que l'une des deux lignes soit plus claire, car les deux lignes n'apparaissent pas nécessairement avec la même intensité. Ceci signifie que vous êtes vraisemblablement enceinte.



NEGATIF: Une ligne colorée apparaît au niveau de la lettre contrôle (C), mais il n'y a pas de ligne visible au niveau de la lettre test (T). Ceci signifie que vous n'êtes vraisemblablement pas enceinte.



NON SIGNIFICATIF: Si aucune ligne n'apparaît au niveau de la lettre de contrôle (C), le résultat n'est pas valable, même si une ligne est visible au niveau de la lettre test (T). Refaites un nouveau test.

LIMITES DU TEST

Ce test peut éventuellement donner de faux positifs et faux négatifs. Consultez votre médecin avant de prendre une décision médicale.

La prise de médicaments qui contiennent de l'hCG (tels que Pregnyl, Profasi, Pergonal et APL), peut entraîner de faux résultats positifs. La prise d'alcool, de médicaments tels la pénicilline, les antibiotiques, la contraception orale, ou les thérapies hormonales qui ne contiennent pas d'hCG ne devraient pas affecter le résultat du test. En dehors de la grossesse, un certain nombre de pathologies, par exemple un kyste ovarien ou une grossesse ectopique (grossesse extra-utérine) peuvent entraîner l'apparition de taux élevés d'hCG, susceptibles de donner un faux résultat positif.

QUESTIONS ET REPONSES

- Q :** Comment fonctionne le test ?
R : Le test de diagnostic de grossesse maybe-baby détecte dans votre urine une hormone qui est produite par votre corps pendant la grossesse (hCG – hormone gonadotrophine chorionique). La quantité d'hormone hCG augmente au fur et à mesure de la grossesse.
- Q :** Combien de temps après une présomption de grossesse dois-je faire le test ?
R : Vous pouvez tester votre urine dès la date présumée des règles. Vous pouvez faire le test à n'importe quel moment de la journée. Cependant, en cas de grossesse, c'est la première urine du matin qui contient le plus d'hormone hCG.
- Q :** Dois-je nécessairement faire le test sur la première urine du matin ?
R : Vous pouvez faire le test à n'importe quel moment de la journée mais votre première urine du matin est généralement la plus concentrée de la journée et contient le plus d'hCG.
- Q :** Quel est le degré de fiabilité et de précision du test ?
R : Des tests en laboratoire ont montré que le test de grossesse maybe-baby était fiable et précis à plus de 99 %.
- Q :** Quelle est la sensibilité du test ?
R : Le test de grossesse maybe-baby met en évidence la présence de l'hormone hCG à partir de 25 IU/l et peut être réalisé avant la date présumée des règles.

Le test détecte la présence de l'hormone de grossesse hCG (choriongonadotrophine humaine) dans l'urine. Cette hormone est décelable à partir de la 1ère semaine après la fécondation et sa concentration double tous les 1,5 à 2 jours. Au premier jour présumé des règles (2 semaines après la fécondation) le taux de hCG est monté à plus de 100 IU/l. La valeur maximale apparaît dans la 10^e – 12^e semaines et se situe alors entre 30.000 et 200.000 IU/l.

- Q :** Que dois-je faire si le résultat montre que je suis enceinte ?
R : Cela signifie que votre urine contient de l'hCG et que vous êtes probablement enceinte. Voyez votre médecin pour avoir la confirmation de votre grossesse et pour discuter de sa prise en charge.
- Q :** Comment savoir si le test a fonctionné convenablement ?
R : Lorsqu'une ligne colorée apparaît au niveau de la lettre contrôle (C) vous indique que vous avez réalisé le test convenablement et que la quantité correcte d'urine a été absorbée.
- Q :** Que dois-je faire si le résultat montre que je ne suis pas enceinte ?
R : Cela signifie que l'hormone hCG n'a pas été détectée dans votre urine et que vous n'êtes probablement pas enceinte. Si vos règles n'apparaissent pas une semaine après la date prévue, recommencez avec un nouveau test. Si vous obtenez le même résultat à l'issue du nouveau test et si vous n'avez toujours pas vos règles, consultez votre médecin.

Nous vous suggérons de prendre les mesures suivantes, afin d'augmenter vos chances de vivre une grossesse agréable et d'avoir un bébé en bonne santé. Lorsque le résultat est positif, vous pouvez mettre en place le suivi prénatal, le mieux étant de prendre contact immédiatement avec votre médecin. Veillez à une alimentation équilibrée, arrêtez de fumer et réduisez votre consommation d'alcool au minimum.

Acide folique: L'acide folique est indispensable pour le développement embryonnaire normal de l'enfant. Particulièrement pendant la grossesse, l'acide folique revêt une grande importance, étant donné qu'il contribue à un processus de la division cellulaire et de formation cellulaire sain et peut se influer positivement sur le développement du système nerveux.

INDEX DES SYMBOLES

	Attention, lire et reporter à la notice d'utilisation		Nombre de tests par coffret		Fabricant
	Pour usage in vitro uniquement		Utiliser avant		Ne pas réutiliser
	Conserver entre 4°C - 30°C		Numéro de Lot		



LaVita GmbH
Alt Praunheim 46D
D-60488 Frankfurt/Main
Germany

 0537

REF : 3532679226452
Version 1 : 05/2012

