


## TEST DI DIAGNOSI DI GRAVIDANZA

### per test autodiagnostico

#### PRINCIPIO

Il test di gravidanza maybe-baby è un test di rilevazione qualitativa dell'ormone gonadotropina corionica umana (hCG) nell'urina utilizzata al fine di diagnosticare una gravidanza. Può essere utilizzato sin dalla data presunta del ciclo mestruale. Il test utilizza una combinazione di anticorpi che consente di rilevare specificatamente tassi elevati dell'ormone hCG. Si effettua il test urinando direttamente sul tampone assorbente o immergendolo nell'urina, ciò che consente di ottenere un risultato sotto forma di linee colorate.

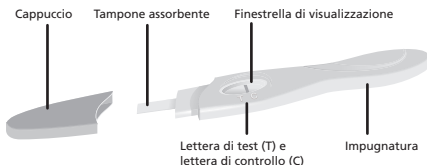

#### PRECAUZIONI

Leggere attentamente il foglio illustrativo prima di eseguire il test. Non utilizzare oltre la data di scadenza indicata sulla busta in alluminio.

Conservare in un luogo asciutto tra 4° - 30°C (o 40° - 86° F).

La busta in alluminio deve essere a temperatura ambiente prima di essere aperta.

Non congelare.

Non utilizzare se la busta è aperta o danneggiata.

Conservare lontano dalla portata dei bambini.

Solo per uso diagnostico in vitro. Non ingerire.

Aprire la busta in alluminio solo al momento della realizzazione del test.

#### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Una busta in alluminio contenente 1 stick ed 1 busta deessicante, 1 foglio illustrativo.

#### MODALITÀ D'USO:

1. Estrarre lo stick dalla busta in alluminio.
2. Sfilare il cappuccio che ricopre il tampone assorbente.

3. Tenere lo stick per l'impugnatura e posizionare il tampone sotto ad un getto di urina per almeno 10 secondi finché sia completamente umido. Vedere illustrazione qui di seguito.
4. **NOTA:** Non urinare sulla finestrella di visualizzazione (C+T). Si possono anche raccogliere le urine in un contenitore pulito ed asciutto, poi immergere il tampone nell'urina per almeno 10 secondi.
5. Rimettere il cappuccio sul tampone e porre lo stick su una superficie asciutta, orizzontale e piana, per cui la finestrella deve essere rivolta verso l'alto.
6. All'inizio del test potrebbe comparire una colorazione rossa che interessa, nella finestrella, entrambe le lettere (C + T). Leggere il risultato dopo 3 minuti. Se non compare alcuna linea colorata, attendere ancora un minuto. Alcuni esiti positivi possono apparire dopo 1 minuto o meno in funzione della concentrazione di hCG.



#### LETTURA DEL TEST



**POSITIVO:** Compaiono due linee colorate distinte. Una linea si trova in prossimità della lettera di controllo (C) e la seconda in prossimità della lettera di test (T). Una delle due linee può essere più marcata in quanto le due linee non devono necessariamente presentare la stessa intensità. Questo significa che è probabile che tu sia incinta.



**NEGATIVO:** In prossimità della lettera di controllo (C) compare una linea colorata. In prossimità della lettera di test (T) non compare nessuna linea. Questo significa che è probabile che tu non sia incinta.



**NON SIGNIFICATIVO:** Se in prossimità della lettera di controllo (C) non compare alcuna linea, il risultato non è valido anche se in prossimità della lettera di test (T) compare una linea. Occorre effettuare un nuovo test.

## LIMITI DEL TEST

Questo test può eventualmente dare falsi esiti positivi e falsi esiti negativi. Consultare il proprio medico prima di prendere una decisione medica. L'assunzione di medicinali che contengono dell'hCG (come Pregnyl, Profasi, Pergonal e APL), può causare falsi esiti positivi, L'assunzione di alcool, di medicinali come la penicillina, gli antibiotici, i contraccettivi orali, o le terapie ormonali che non contengono hCG non dovrebbero incidere sull'esito del test. Salvo la gravidanza, un certo numero di patologie, per esempio una ciste ovarica o una gravidanza ectopica (gravidanza extrauterina) possono causare l'apparizione di tassi elevati di hCG, suscettibili di dare un falso esito positivo.

## DOMANDE E RISPOSTE

1. D: Come funziona il test ?

R: Il test di diagnosi di una gravidanza maybe-baby rileva nell'urina un ormone che è prodotto dal corpo durante la gravidanza (hCG – ormone gonadotropina corionica). La quantità di ormone hCG aumenta con il trascorrere della gravidanza.

2. D: Dopo quanto tempo da una presunzione di gravidanza devo fare il test?

R: Può eseguire il test dell'urina sin dalla data presunta del ciclo mestruale. Può fare il test in qualsiasi momento della giornata. Tuttavia, in caso di gravidanza, è la prima urina del mattino che contiene maggiormente ormone hCG.

3. D: Devo necessariamente fare il test sulla prima urina del mattino?

R: Può eseguire il test in qualsiasi momento della giornata, tuttavia la prima urina del mattino è generalmente la più concentrata della giornata e contiene maggiormente hCG.

4. D: Quanto è affidabile e preciso il test?

R: Test di laboratorio hanno dimostrato che il test di gravidanza maybe-baby ha un grado di affidabilità e precisione superiore al 99%.

5. D: Qual è la sensibilità del test?

R: Il test di gravidanza maybe-baby evidenzia l'ormone hCG a partire da 25 IU/l e può essere eseguito fino a del giorno in cui attendi le mestruazioni.

Il test rileva l'ormone della gravidanza hCG (coriogonadotropina umana) nelle urine. Questo ormone è rilevabile fin dalla prima settimana del concepimento e la sua concentrazione si raddoppia ogni 1,5 – 2 giorni. Il giorno in cui è previsto il ciclo (2 settimane dopo il concepimento), il tasso di hCG è salito a oltre 100 IU/l. Il valore massimo si raggiunge nella 10° – 12° settimana con un tenore compreso tra 30.000 e 200.000 IU/l.

6. D: Che cosa devo fare se l'esito mostra che sono incinta?

R: Ciò significa che la sua urina contiene dell'hCG e che è probabilmente incinta. Consulti il suo medico per avere la conferma della sua gravidanza e per discutere della sua presa a carico dalla Previdenza sociale.

7. D: Come faccio a sapere se il test ha funzionato adeguatamente?

R: Se compare una linea colorata in prossimità della lettera di controllo (C), le indica che ha realizzato il test in maniera adeguata e che la quantità giusta di urina è stata assorbita.

8. D: Che cosa devo fare se l'esito mostra che non sono incinta?

R: Ciò significa che l'ormone hCG non è stato rilevato nella sua urina e che probabilmente non è incinta. Se non appaiono le sue mestruazioni una settimana dopo la data prevista, ripeta il test con un nuovo stick. Se ottiene lo stesso esito al termine del nuovo test e se non sono ancora apparse le sue mestruazioni, consulti il suo medico.

Desideriamo suggerirti di attenerti alle seguenti regole per avere maggiori possibilità di una gravidanza tranquilla e un bambino sano. Se il risultato del test è positivo, puoi iniziare le misure di assistenza prenatale e metterti il prima possibile in contatto col tuo medico. Segui un'alimentazione bilanciata, smetti di fumare e riduci al minimo il consumo di alcool.

**Acido folico:** l'acido folico è indispensabile per il normale sviluppo embrionale del bambino. Soprattutto durante la gravidanza, l'acido folico è molto importante poiché contribuisce ad un sano processo di suddivisione e formazione cellulare e può influire positivamente sullo sviluppo del sistema nervoso.

## INDICE DEI SIMBOLI

	Attenzione, riferirsi al foglio illustrativo		Numero di test per confezione		Produttore
	Solo per uso in vitro		Utilizzare entro		Non riutilizzare
	Conservare tra 4° e 30°C		Numero di lotto		



LaVita GmbH  
Alt Praunheim 46D  
D-60488 Frankfurt/Main  
Germany

CE 0537

REF : 3532679226452  
Version 1 : 05/2012



SERVIZIO CONSUMATORI  
+41 (0) 848 48 48 24